

	GAZİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Dok.Kod: S.AM.TL.37
		Yay.Tar:
	TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER KULLANMA TALİMATI	Rev. No: 00
		Rev.Tar: 08.11.2022
		Sayfa No: 1/1

Temassız ateş ölçer hastalığın tanısı ve izlenmesi için vücuda temasa gerek olmadan insan vücut sıcaklığını ölçmek amacıyla kullanılır. Çalışanlarının güvenliğinde ve ateş ölçümü cihazının kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemektir.

Cihaz Kullanımı

- Cihaz; üzerinde bulunan kızılötesi sensor sayesinde, vücudun yaydığı 5-14 µm dalga boyundaki kızılötesi ışımayı algılayarak insan vücut sıcaklığını ölçer.
- Ortam sıcaklığının 10,0 °C den küçük olduğu durumlarda ve 40,0 °C den büyük olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.
- Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dahil ısıdan uzak tutulmalıdır.
- Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme yada çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.
- Ölçüm yapılırken mode olarak vücut(Body) modu seçilmelidir.

Cihazı 5 cm'lik mesafeden ölçüm düğmesine basarak alana tutun (yerleştirme için yukarıdaki resme bakın), ateş hemen görülecektir. Alında saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin.

Oda sıcaklığı önemli derecede farklı ise veya alın terli ise, ateşi kulak memesinin arkasından da ölçebilirsiniz. Saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin

HAZIRLAYAN/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza	KALİTE DİREKTÖRÜ/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza	DEKAN/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza
---	---	--