

	GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Dok.Kod: S.AM.TL.21
		Yay.Tar:
	AMELİYATHANE AMELİYAT MASASI KULLANMA TALİMATI	Rev. No: 00
		Rev.Tar: 08.11.2022
		Sayfa No: 1/2

1. Amaç

Ameliyat masasının doğru kullanılmasını sağlayarak ameliyat esnasında hasta pozisyonundan kaynaklı sorunları engellemek güvenli cerrahî işlem yapılması.

2. Kapsam

Ameliyathanede bulunan ameliyathane masasını kapsar.

3. Tanımlar

4. Ameliyat masası hastanın üzerine yatırılarak ameliyat edilen özel donanımlı masa

5. Sorumlular

Ameliyathane çalışanları.

6. Uygulama

6.1. Masa dü z pozisyonda bulunur. Masanın üzerinde mutlaka jelli hasta örtüsü bulunmalıdır. Kol tahtaları takılır. Masa sabitleme pedalı kontrol edilir ve sabitlenir.

6.2. Hasta ameliyat masasına alınır hasta emniyet kemerleri ile düşme riskine karşı emniyet kemerleri ile bağlanır.

6.3. Hastayı yukarı sağa sola yukarı aşağı hareketlendirmemiz gerekirse masaya bağlı el kumandası ile hareket sağlanır kumanda çalışmadığında masanın yan alt kısmındaki kumanda ile hareketler sağlanır Bunlar yapılabilmesi için masanın şarjının tamamlanmış olması gerekir.

6.4. Masanın yerde dondurulması gerekirse ayak pedal kilidi kullanılarak değişim sağlanır sonra sabitlenir.

5. 5. Masanın düzeni sağlandıktan ve hasta güvenliği sağlandıktan sonra ameliyat örtme ve uyutma işlemine geçilir.

5. 6. ameliyat sonrası masa nemli bez ve dezenfektanlarla temizlenir bir sonraki

HAZIRLAYAN /...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza	KALİTE DİREKTÖRÜ/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza	DEKAN/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza
--	--	---

	GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Dok.Kod: S.AM.TL.21
		Yay.Tar:
	AMELİYATHANE AMELİYAT MASASI KULLANMA TALİMATI	Rev. No: 00
		Rev.Tar: 08.11.2022
		Sayfa No: 1/2

hastaya hazır hale getirilir.

7. İlgili Döküman

HAZIRLAYAN/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza	KALİTE DİREKTÖRÜ/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza	DEKAN/...../..... Adı Soyadı/Unvanı İmza
---	---	--