

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı ThinkPad Tablet Dock- Hasta Monitörü Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0014
		Yayın Tarihi:	20.032023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan ThinkPad Tablet Dock- Hasta Monitörü cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan ThinkPad Tablet Dock- Hasta Monitörü cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

AC Adaptörü: Monitör için güç ve şarj cihazı

Monitör Kılıfı: Monitör için koruyucu kılıf

Monitör sabitleme ve bağlantı platformu: Tablet monitörün ilgili bağlantılarının yapılması ve monitörün dik şekilde olabildiğini sağlayan platform

4. Sorumlular

Dersten sorumlu öğretim elemanları

5. UYGULAMA

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

5.1 Cihaz Hazırlama

- Maket monitörü platformuna yerleştirilir.
- Platform ethernet, HDMI ve 3 adet USB 3.0 bağlantı noktasına sahiptir.
- USB bağlantı noktalarından biri özel bir güç bağlantı noktasıdır.
- Ürünün;
 - Yaklaşık Yükseklik: 40,2 mm (1,58 inç)
 - Yaklaşık Genişlik: 160 mm (6,30 inç)
 - Yaklaşık Derinlik: 119.5 mm (4.70 inç)
 - Yaklaşık Ağırlık: 0,4 Kg (0,88 lb)dir.
 - Platform ile elektrik prizi arasındaki bağlantı sağlanır.

5.2 Cihaz Ayarları

- Monitörün açma/kapama düğmesine basılır.
- Önceden açılmış maket ve SimPad ile monitör arasındaki bağlantı kurulur.
- SimPad'de oluşturulan mod ve senaryoya yönelik parametreler monitöre aktarılır.
- Parametrelerin görünmesi için monitörde ilgili alanlara elle tıklanarak SimPad'de oluşturulan bilgiler monitöre aktarılır.
- Maket, SimPad ve monitör arasındaki uyum sağlanır.
- Uygulamaya başlanır.

5.3 Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihaz çalıştırılmadan önce, tüm bağlantı kabloları gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilir. Hasarlı kablo ve bağlantılar hemen değiştirilmelidir.
- Monitör kullanılmayacağı zamanlarda prize takılı bırakılmamalıdır.
- Monitör kullanılmayacağı zamanlarda kılıfı içinde muhafaza edilmelidir.
- Monitör ısı ve sıvıdan uzak tutulmalıdır.

6. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları Ek-de verilmiştir.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı ThinkPad Tablet Dock- Hasta Monitörü Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0014
		Yayın Tarihi:	20.032023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

HAZIRLAYAN/...../.....	ONAYLAYAN/...../.....
İMZA	Dekan İMZA

