

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pedatri Simülasyon Laboratuvarı Çocuk Tartısı Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0007
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/5

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan "Çocuk Tartısı" cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan "Çocuk Tartısı" cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

3. Sorumlular

Dersten sorumlu öğretim elemanları ve öğrenciler

4. Uygulama

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

4.1 Cihaz Hazırlama

- Tartı sert bir zemine yerleştirilir.
- Tartı üzerindeki değerin sıfırda olduğu kontrol edilir.
- Ölçüm öncesi eller yıkanır.
- Tartının üzerine ince bir disposable örtü serilir.

4.2 Cihaz Ayarları

- Bir sakıncası yoksa çocuğun ayakkabıları çıkarılır.
- Çocuğun üzerinde ölçümü etkileyebilecek ceket, kaban vb. varsa çıkarılır.
- Çocuk tartıya çıkarılır, tartı üzerinde ayakta hareketsiz durması sağlanır.
- Ölçüm sırasında çocuğun yalnız olması sağlanır. Ölçüm değerin çevreden görünmesi engellenir.
- Çocuğun tartıdan inmesine, ayakkabı ve kıyafetlerini giymesine yardım edilir.
- Disposable örtü atılır ve eller yıkanır.

4.3 Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihaz çalıştırılmadan önce, tüm bağlantı kabloları ve pilleri gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilir. Hasarlı kablo, bağlantılar ve piller hemen değiştirilmelidir.
- Bebek tartısı kullanılmayacağı zamanlarda örtü ile kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Bebek tartısı ısı ve sıvıdan uzak tutulmalıdır.

5. İlgili Dokümanlar


- Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları Ek-1'de verilmiştir.

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
---	---

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pedriatri Simülasyon Laboratuvarı Çocuk Tartısı Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0007
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/5

Ek-1

BOSCH markalı dijital çocuk tartısı kullanım kılavuzu

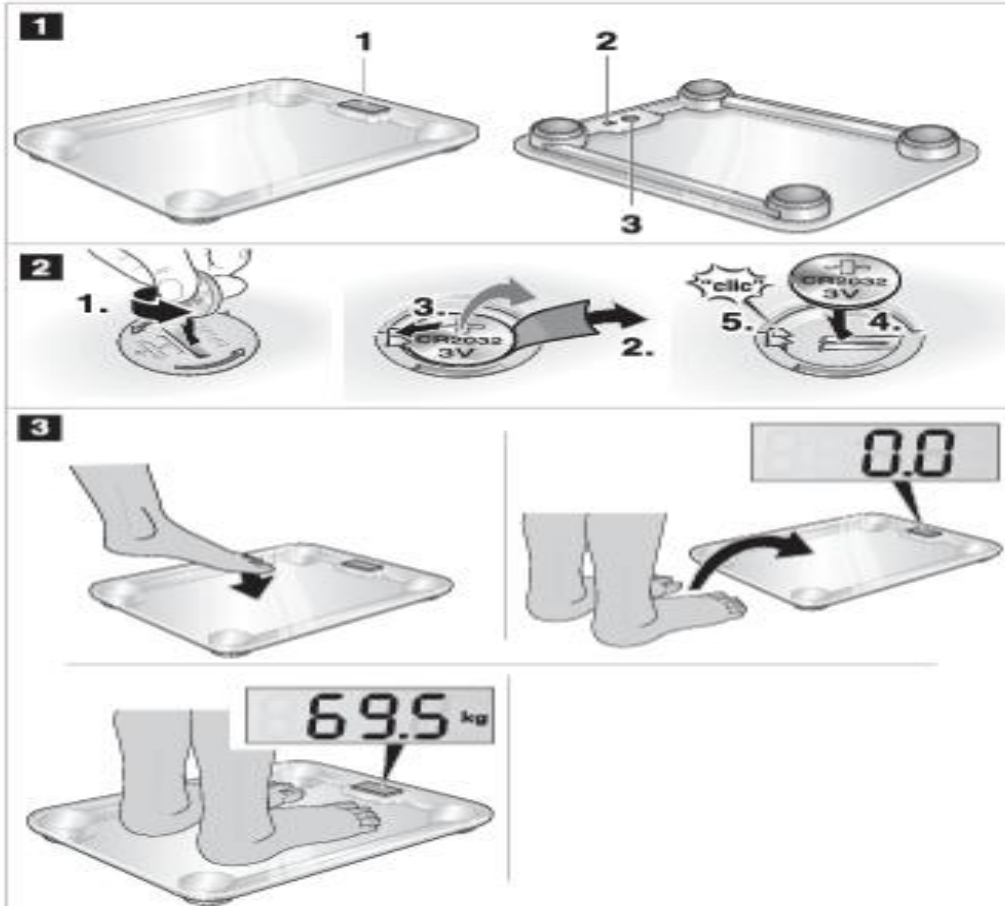



**Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Pediatri Simülasyon Laboratuvarı
Çocuk Tartısı Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı**

Doküman No:	HEF.TL.0007
Yayın Tarihi:	20.03.2023
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	0
Sayfa:	1/5

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz evde kullanılmak için üretilmiş olup, ticari ve tıbbi işletmelerdeki kullanım için elverişli değildir.

Kullanma kılavuzunu itinayla saklayınız!

Cihazda yapılacak onarımlar, herhangi bir tehlike oluşmasını önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır. Tartıya ıslak ayaklar ile veya tartının üzeri ıslakken çıkmayınız, aksi halde kayıp düşme ihtimali söz konusudur.

Tartının üzerine herhangi bir cisim düşürmeyiniz.

Genel bakış

Resim 1

- 1 Gösterge
- 2 Seçme şalteri (ölçüm birimi için)
- 3 Pil gözü

Cihazın çalıştırılması

- Pil gözünden 3 folyoyu dışarı çekiniz
Resim 2.
- Tartıyı düz, sert ve kuru bir zemin üzerine yerleştiriniz.

Tartıyı teslim aldığınızda, ölçüm birimi olarak kg ayarlanmıştır. Bu ayar, seçme şalteri 2 üzerinden lb (İngiliz ağırlık birimi) veya st (İngiliz ölçüm birimi stone) olarak da değiştirilebilir.

Bilgi

lb ayarında, tartma kademeleri 0.1 lb adımları ile gösterilir, st ayarında ise, alt birim olarak pound kullanılır.

Tartının kullanılması

Resim 3

- Tartının üst tarafının ortasına basarak (tıklayarak) tartıyı açınız.
- Göstegede 1 0.0 görününceye kadar bekleyiniz.
- Tartının üzerine çıkınız ve göstegede çubuk göstergesi 1 çalıştığı sürece, tartı üzerinde hareket etmeden durunuz. Ağırlığınızı iki bacağınıza aynı oranda dağıtınız.

Şimdi ölçüm değerini okuyabilirsiniz. Tartı, kg ayarında 100 g ölçüm adımları ile ağırlığınızı gösterir.

Tartı ölçüm işleminden sonra otomatik olarak kapanır.

Cihazın temizlenmesi

Tartı kesinlikle suya sokulmamalıdır.

Temizlik için buharlı temizleme cihazları kullanılmamalıdır.

- Tartıyı nemli bir bez ile siliniz, ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cam yüzeyi, normal bir cam silme maddesi ile silip temizleyiniz.

Hata mesajları

– Göstegede 1 EE görüntüsü beliriyor:

Tartılacak kişi çok ağır
(azm. 150 kg / 330 lb / 23,5 st).

Tartma işlemi sakın durularak veya yeterince uzun durularak yapılmadı. Tartı üzerinde en az 5 saniye sakın durulmalıdır.

– Göstegede 1 0 görüntüsü beliriyor:

Pil boşalmış veya zayıflamış.

Pili değiştiriniz (bkz. Resim 2).

Akü kullanmayınız! Sadece aynı türden pil kullanınız.



**Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Pediatri Simülasyon Laboratuvarı
Çocuk Tartısı Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı**

Doküman No:	HEF.TL.0007
Yayın Tarihi:	20.03.2023
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	0
Sayfa:	1/5

Cihazın giderilmesi

Güncel giderme yöntemleri için yetkili satıcıdan veya belediyeden bilgi alınız. Eski pilleri resmi toplama yer veya merkezlerine ya da yetkili satıcıya veriniz.

Ga- ran- ti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususda daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.

Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Değişiklikler olabilir.

Wskazówki bezpieczeństwa

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zawodowego, nie medycznego.

Instrukcję użytkowania i obsługi proszę starannie przechowywać!

Aby uniknąć zagrożeń, naprawy urządzenia należy do wykonywać tylko w autoryzowanym punkcie serwisowym naszej firmy.

Nie stawać na wadze mokrymi stopami, ani gdy powierzchnia wagi jest wilgotna – **niebezpieczeństwo ześlizgnięcia**.

Zwracać uwagę, aby na wagę nie spadały żadne przedmioty.

Opis urządzenia

Rysunek 1

- 1 Wyświetlacz
- 2 Przycisk nastawiania jednostki
- 3 Komora baterii zasilającej

Uruchamianie urządzenia

- Otworzyć komorę baterii zasilającej **3** i wyjąć pasek folii osłaniający styki baterii rysunek **2**.
- Wagę postawić na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.

Waga nastawiona jest fabrycznie na kg. Nastawienie to można zmienić za pomocą przycisku nastawiania jednostki **2** na lb (angielski funt) lub st (angielska jednostka miernicza stone).

Wskazówka:

Przy nastawieniu na lb wyświetlacz wskazuje z dokładnością do 0,1 lb; przy nastawieniu na st jednostką podrzędną jest pound.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatric Simülasyon Laboratuvarı Çocuk Tartısı Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0007
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/5