

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı Nursing Kid Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0012
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan "Nursing Kid" Maketi cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan "Nursing Kid" Maketi cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

SimPad: Operatörün uzaktan kumandasıdır.

Bağlantı Kutusu: Hasta simülatörüne bağlanır ve onu kontrol eder.

Manken adaptör kablosu: Simpad'ı hasta simülatörlerine bağlar.

Manken Kayışı: Bağlantı Kutusunu ve pili hasta simülatörüne bağlar.

Nursing Kid Maketi: Uygulamanın yapılacağı çocuk sim maketidir.

4. Sorumlular

Dersten sorumlu öğretim elemanları

5. Uygulama

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

5.1 Cihaz Hazırlama

- SimPad mankene bağlanır,
- Li-Ion pili Bağlantı Kutusuna bağlanır,
- Bağlantı Kutusunu ve pili mankene takmak için verilen manken kayışı kullanılır,
- Önce maket sonra SimPad açılır,
- Maketin kullanıma hazır olma işareti olan "öksürme" refleksi beklenir.
- SimPad ve bağlantı kutusu arasındaki bağlantı sağlanır,

5.2 Cihaz Ayarları

- Hasta monitörü açılır. Simülasyonun hasta monitorine bağlantısı sağlanır,
- Otomatik mode ya da manuel mode ile çalıştırılır.
- Daha sonra kullanılabilecek senaryolar kaydedilir.
- Parametreler el ile girilir.
- İhtiyaç halinde internete bağlantı sağlanır,
- Kulaklık takılarak ses kontrolü sağlanır,
- Uygulamaya başlanılır.

Nursing Kid (Hemşirelik Çocuk) Maketinde;

- Yaşam Bulguları Takibi, Monitör ile İzlem
 - Akciğer, kalp, bağırsak sesleri dinleme,
 - Seslendirme yapabilme,
 - Veri toplama Fizik Muayene ve Bakım Uygulamalarında kullanım dahil birçok prosedürün uygulanmasına izin verecek niteliktedir.
- Maketlerin özellikleri ve tasarlanan senaryolara uygun olarak girişim ve değerlendirmeler yapılır.
 - Uygulama sonunda SimPad ve maketler kapatılır ve fişlerden çekilir.
 - Uygun örtü ve kılıflarla kapatılarak bir sonraki uygulama için bırakılır.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı Nursing Kid Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0012
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

5.3 Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihaz çalıştırılmadan önce, tüm bağlantı kabloları gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilir. Hasarlı kablo ve bağlantılar hemen değiştirilmelidir.
- Bebek maketi kullanılmayacağı zamanlarda örtü ile kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Bebek maketi ısı ve sıvıdan uzak tutulmalıdır.

5. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları Ek-de verilmiştir.

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
---	---

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı Nursing Kid Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0012
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

EK-1.
Hemşirelik Çocuk Maketi;

← Back



350-05050

NSG KID (\$)

Expect Shipping Delays

Easy-to-use simulation for patient care and clinical skills development

This product is not available to purchase online

[Request more information](#)

For use with:

[Nursing Kid](#) >

URL: <https://laerdal.com/products/simulation-training/nursing/nursing-kid/>