

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Elektrikli Süt Pompası Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0026
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan Elektrikli Süt Pompası cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan Elektrikli Süt Pompası cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

3.1 Emiş aparatı: Yarım daire şeklinde bir ucu meme ucuna yerleştirilen diğer ucu pompaya bağlı olan aparat

3.2 Silikon masaj pedi: Emiş aparatının içine yerleştirilen silikon meme ucunu destekleyip emzirme hissi oluşturan aparat

4. Sorumlular

Dekan, Dekan yardımcıları, dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

5. Uygulama

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

5.1 Cihaz Hazırlama

a) Elektrikli Süt Pompası dolaptan çıkarılır.

5.2 Cihaz Ayarları

- Elektrikli Süt Pompası malzemelerinin tümü sert bir zemine yerleştirilir.
- Süt ile temas eden her parça her kullanımdan önce temizlenir ve kurutulur.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce göğüs ve göğüs ucunuzu temizlenir, sıcak kompres uygulanır ve masaj yapılır.
- Pompa gövdesi biberon ile birleştirilir.
- Pompa gövdesinin ucuna emiş aparatı yerleştirilir.
- Emiş aparatının içine silikon masaj pedi yerleştirilir.
- Biberon taban parçası üzerine yerleştirilir.
- Pompanın kablosu prize takılır.
- Açma kapama düğmesinden açma kapama işlemi, +/- seçeneklerinden vakumlama gücü ayarlanır. 7 vakumlama seviyesinden en uygun olanı seçilir.
- En düşük vakum ayarı ile süt sağma işlemi başlatır, kademeli olarak yükseltilir.
- Kullanım bittiğinde stop tuşuna basarak süt sağma pompasını kapatılır.
- Süt pompasına ait tüm parçalar işlem sonrası temizlenir ve tekrar kullanıma hazırlanır.

5.3 Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihazın düzenli bakımını yapın ve temizlik talimatlarına uyun.
- Bakım tarihlerini kaydedin ve gerekli parça değişimlerini gerçekleştirin.
- Yangın durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü kullanın.
- Cihazın kalibrasyonu yılda en az bir kere biyomedikal birimine yaptırılmalıdır.

5.4 Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı

- Gerekli olduğu takdirde uygulamalar sırasında uygun eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uzun saçlar toplanmalı, sarkık takılar çıkarılmalı ve bol giysiler giyilmemelidir.
- Sandalet, terlik gibi açık burunlu ayakkabılar giyilmemelidir.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Elektrikli Süt Pompası Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0026
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

5.5. Elektrikle İlgili Kontroller

- Elektrikli cihazlar, kuru ellerle kullanılmalı ve fişten çekilirken kablo yerine fişten tutularak çekilmelidir.
- Gerekli durumlar hariç çalışma öncesi elektrikli cihazların güç düğmesinin kapalı ve fişinin prizde takılı olmamasına dikkat edilmelidir.
- Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa topraklı ve sigortalı prize takılmalı, birbirine eklenerek kullanılmamalı ve çoğaltıcı takılmamalıdır.
- Çıkışlarda tüm cihazların (bilgisayar, projeksiyon vb) ve elektrik kaynaklarının kapatılmalıdır.
- Cihaz kablolarının korunaklı olarak sabitlenmeli, üzerine herhangi bir materyal konulmamalı, sıkışma durumları ve bütünlükleri kontrol edilmelidir.

5.6. Atık Yönetimi ve Temizlik

- Atıklar tehlike sınıflarına göre ayrılmalı ve belirlenen toplama kaplarında saklanmalıdır.
- Laboratuvar çalışması bittikten sonra kullanılan tüm malzemeler temizlenmeli, orijinal yerlerine yerleştirilmelidir.
- Kirli malzemeler belirlenen temizleme prosedürlerine uygun şekilde işleme tabii tutulmalıdır.

5.7. Bireysel Koruma

- Çalışma sırasında ergonomik kurallara uyulmalıdır.

6. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
---	---