

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı Nursing Baby Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0011
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan "Nursing Baby" maketi cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan "Nursing Baby" maketi cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

SimPad: Operatörün uzaktan kumandasıdır.

Bağlantı Kutusu: Hasta simülatörüne bağlanır ve onu kontrol eder.

Manken adaptör kablosu: Simpad'ı hasta simülatörlerine bağlar.

Manken Kayışı: Bağlantı Kutusunu ve pili hasta simülatörüne bağlar.

Nursing Baby Maketi: Uygulamanın yapılacağı bebek sim maketidir.

4. Sorumlular

Dersten sorumlu öğretim elemanları

5. Uygulama

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

5.1 Cihaz Hazırlama

- SimPad mankene bağlanır,
- Li-Ion pili Bağlantı Kutusuna bağlanır,
- Bağlantı Kutusunu ve pili mankene takmak için verilen manken kayışı kullanılır,
- Önce maket sonra SimPad açılır,
- Maketin kullanıma hazır olma işareti olan "öksürme" refleksi beklenir.
- SimPad ve bağlantı kutusu arasındaki bağlantı sağlanır,

5.2 Cihaz Ayarları

- Hasta monitörü açılır. Simülasyonun hasta monitorine bağlantısı sağlanır,
- Otomatik mode ya da manuel mode ile çalıştırılır.
- Daha sonra kullanılabilecek senaryolar kaydedilir.
- Parametreler el ile girilir.
- İhtiyaç halinde internete bağlantı sağlanır.
- Kulaklık takılarak ses kontrolü sağlanır,
- Uygulamaya başlanılır
- Nursing Baby Maketinde;
 - Yaşam Bulguları Takibi, Monitör ile İzlem
 - Akciğer, kalp, bağırsak sesleri dinleme,
 - Seslendirme yapabilme,

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Pediatri Simülasyon Laboratuvarı Nursing Baby Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0011
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

- Veri toplama Fizik Muayene ve Bakım Uygulamalarında kullanım dahil birçok prosedürün uygulanmasına izin verecek niteliktedir.

- Maketlerin özellikleri ve tasarlanan senaryolara uygun olarak girişim ve değerlendirmeler yapılır.
- Uygulama sonunda SimPad ve maketler kapatılır ve fişlerden çekilir.
- Uygun örtü ve kılıflarla kapatılarak bir sonraki uygulama için bırakılır.

5.3 Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihaz çalıştırılmadan önce, tüm bağlantı kabloları gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilir. Hasarlı kablo ve bağlantılar hemen değiştirilmelidir.
- Bebek maketi kullanılmayacağı zamanlarda örtü ile kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Bebek maketi ısı ve sıvıdan uzak tutulmalıdır.

6. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Firma tarafından belirlenmiş ürün görselleri ve bağlantı linkleri Ek-1’de verilmiştir.

HAZIRLAYAN/...../.....	ONAYLAYAN/...../.....
İMZA	İMZA



**Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Pediatri Simülasyon Laboratuvarı
Nursing Baby Maketi Kullanma ve Güvenlik Talimatı**

Doküman No:	HEF.TL.0011
Yayın Tarihi:	20.03.2023
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	0
Sayfa:	1/3

Ek- Hemşirelik Bebek Maketi

← Back

365-05050

NSG BABY (S)

Expect Shipping Delays

Easy-to-use simulation for patient care and clinical skills development

This product is not available to purchase online

[Request more information](#)



For use with:

[Nursing Baby](#) >

URL: <https://laerdal.com/products/simulation-training/nursing/nursing-baby>