

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Manuel Süt Pompası Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0028
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan Manuel Süt Pompası cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan Manuel Süt Pompası cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

3.1. Emiş aparatı: Yarım daire şeklinde bir ucu meme ucuna yerleştirilen diğer ucu pompaya bağlı olan aparat

3.2. Silikon masaj pedi: Emiş aparatının içine yerleştirilen silikon meme ucunu destekleyip emzirme hissi oluşturan aparat

4. Sorumlular

Dekan, Dekan yardımcıları, dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

5. Uygulama

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

5.1. Cihaz Hazırlama

a) Manuel süt pompası dolaptan çıkarılır.

5.2. Cihaz Ayarları

- Manuel süt pompası malzemelerinin tümü sert bir zemine yerleştirilir.
- Süt ile temas eden her parça her kullanımdan önce temizlenir ve kurutulur.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce göğüs ve göğüs ucunuzu temizlenir, sıcak kompres uygulanır ve masaj yapılır.
- Pompa gövdesi biberon ile birleştirilir.
- Pompa gövdesinin ucuna emiş aparatı yerleştirilir.
- Emiş aparatının içine silikon masaj pedi yerleştirilir.
- Biberon taban parçası üzerine yerleştirilir.
- Süt pompası meme ucuna yerleştirilir.
- Pompa kolu sıkıp gevşetilerek süt çıkarılır.
- Süt pompasına ait tüm parçalar işlem sonrası temizlenir ve tekrar kullanıma hazırlanır.

5.3. Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihazın düzenli bakımını yapın ve temizlik talimatlarına uyun.
- Bakım tarihlerini kaydedin ve gerekli parça değişimlerini gerçekleştirin.
- Yangın durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü kullanın.
- Cihazın kalibrasyonu yılda en az bir kere biyomedikal birimine yaptırılmalıdır.

5.4. Atık Yönetimi ve Temizlik

- Atıklar tehlike sınıflarına göre ayrılmalı ve belirlenen toplama kaplarında saklanmalıdır.
- Manuel süt pompası kullanıldıktan sonra kullanılan tüm malzemeler temizlenmeli, orijinal yerlerine yerleştirilmelidir.
- Kirli malzemeler belirlenen temizleme prosedürlerine uygun şekilde işleme tabii tutulmalıdır.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Manuel Süt Pompası Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0028
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

5.5. Bireysel Koruma

a) Çalışma sırasında ergonomik kurallara uyulmalıdır.

6. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Manuel Süt Pompası Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0028
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

HAZIRLAYAN/...../.....	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
--	--