

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yenidoğan Kurtarma Simülatörü Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0032
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan Yenidoğan Kurtarma Simülatörü cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi'nde kullanılan Yenidoğan Kurtarma Simülatörü cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

Yenidoğan Kurtarma Simülatörü yenidoğan özelliklerine sahip doğumun hemen sonrasında bebeğe ilişkin özelliklerin ve uygulamaların gösterilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

4. Sorumlular

Dekan, Dekan yardımcıları, dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler.

5. Uygulama

(Kullanıcının cihaz hakkında eğitim aldığı varsayılarak hazırlanmıştır)

5.1 Cihaz Hazırlama

a) Cihazı uygun elektrik prizine bağla ve güç kaynağını aç.

5.2 Cihaz Ayarları

- Hava yolu açıklığı sağlanır.
- Hipoksi açısından yenidoğanın baş, boyun, çene, kollar ve bacaklarının rengi (Sağlıklı-Orta derece siyanoz- Şiddetli derece siyanoz) değerlendirilir.
- Yenidoğanın solunumu değerlendirilir.
- Umbilikal arterdeki atım kontrol edilir.
- Yenidoğanın göğüs hareketleri gözlemlenir.
- Değerlendirme sonrası yenidoğanın APGAR skoru 3'ün altında ise resusütasyona geçilir.

5.3 Öngörülen anormal durumlar ve önlemler

- Cihaz uygun güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Sistem çalıştırılmadan önce, tüm bağlantı kabloları gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilir.
- Hasarlı kablo ve bağlantılar hemen değiştirilmelidir.
- Cihaz temizliği yapılırken elektrik aksamalarına dikkat edilmelidir.
- Cihazın düzenli bakımını yapın ve temizlik talimatlarına uyun.
- Yangın durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü kullanın.
- Cihazın kalibrasyonu yılda en az bir kere biyomedikal birimine yaptırılmalıdır.

5.4 Elektrikle İlgili Kontroller

- Elektrikli cihazlar, kuru ellerle kullanılmalı ve fişten çekilirken kablo yerine fişten tutularak çekilmelidir.
- Gerekli durumlar hariç çalışma öncesi elektrikli cihazların güç düğmesinin kapalı ve fişinin prizde takılı olmamasına dikkat edilmelidir.
- Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa topraklı ve sigortalı prize takılmalı, birbirine eklenerek kullanılmamalı ve çoğaltıcı takılmamalıdır.
- Çıkışlarda tüm cihazların (bilgisayar, projeksiyon vb) ve elektrik kaynaklarının kapatılmalıdır.
- Cihaz kablolarının korunaklı olarak sabitlenmeli, üzerine herhangi bir materyal konulmamalı, sıkışma durumları ve bütünlükleri kontrol edilmelidir.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yenidoğan Kurtarma Simülatörü Cihazı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0032
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/2

5.5. Bireysel Koruma

a) Çalışma sırasında ergonomik kurallara uyulmalıdır.

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
---	--