

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | <b>Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi</b><br><b>Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Beceri Laboratuvarı</b><br><b>Simman Simülasyon Cihazı</b><br><b>Kullanma ve Güvenlik</b><br><b>Talimatı</b> | <b>Doküman No:</b>      | HEF.TL.0024 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Yayın Tarihi:</b>    | 20.03.2023  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Revizyon Tarihi:</b> | -           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Revizyon No:</b>     | 0           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Sayfa:</b>           | 1/2         |

## 1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Beceri Laboratuvarı'nda kullanılan Simman simülasyon cihazının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

## 2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Beceri Laboratuvarı'nda kullanılan Simman simülasyon cihazı etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

## 3. Tanımlar

Temel ve ileri yaşam desteği eğitimini kolaylaştıran hasta simülasyon sistemleri, eğitmenin gerçekçi klinik durumlara dayanarak öğrencinin bireysel ve ekip becerilerini etkili bir şekilde değerlendirmesini sağlayan cihazlardır.

## 4. Sorumlular

Dekan, Dekan yardımcıları, Hemşirelik Esasları ABD Öğretim Üye ve Elemanları, Öğrenciler

## 5. Uygulama

### 5.1 Cihaz Hazırlama

- Simülatör ve çalıştırma ekipmanları uygun güç kaynağına bağlanır.
- Bağlantı noktaları kontrol edilir.

### 5.2 Cihaz Ayarları

- Simülatörün bağlı olduğu bilgisayar ve çalıştırma ekipmanları çalıştırılır.
- Eğitmen bilgisayarı açılmadan önce mankenin nefes almaya başlaması beklenir.
- Hasta monitörü uygulama yazılımını başlatılır.
- Simülasyonu başlatmak için önceden programlanmış bir senaryo seçilir ve başlatılır.
- Simülasyon sırasında nabız, solunum sayısı gibi parametreler izlenebilir ve değiştirilebilir.
- Simülasyon oturumu tamamlandığında sonlandırılır.
- Oturum kaydedilecekse dosyalara kaydedilir.
- Simülatörün bağlı olduğu bilgisayar ve çalıştırma ekipmanları kapatılır.

### 5.3 Öngörülen Anormal Durumlar ve Önlemler

- Simülatör ve çalıştırma ekipmanları uygun güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Sistem çalıştırılmadan önce, tüm bağlantı kabloları gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Hasarlı kablo ve bağlantılar hemen değiştirilmelidir.
- Simülatör ve çalıştırma ekipmanlarının temizliği yapılırken elektrik aksamalarına dikkat edilmelidir ve temizlik talimatlarına uyulmalıdır.
- Simülatör sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
- Simülatörün içerisinde bulunan kablolar çıkarılmışsa simülatör kullanılmamalıdır.
- Düzenli aralıklarla servis bakımları yapılmalıdır.

## 6. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | <b>Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi</b><br><b>Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Beceri Laboratuvarı</b><br><b>Simman Simülasyon Cihazı</b><br><b>Kullanma ve Güvenlik</b><br><b>Talimatı</b> | <b>Doküman No:</b>      | HEF.TL.0024 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Yayın Tarihi:</b>    | 20.03.2023  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Revizyon Tarihi:</b> | -           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Revizyon No:</b>     | 0           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | <b>Sayfa:</b>           | 1/2         |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br>...../...../..... | <b>ONAYLAYAN</b><br>...../...../..... |
| İMZA                                   | Dekan<br>İMZA                         |