



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İş Akışı

Doküman No:	DHF.İA.0086
Yayın Tarihi:	29.05.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
MSÜ de kullanılan medikal cihazlara ilgili doğrulama testleri yapılır.	MSÜ sorumlusu ve MSÜ Personeli	Biolojik test raporları Bowie Dick test raporları Vakum Kaçak Testi
Kontamine malzemeleri ilgili birimlerden teslim alınır.	MSÜ Personeli	
Kontamine malzemelerin MSÜ'ne transferi yapılır.	MSÜ Personeli	
Kontamine malzemelerin kirli alana kabulü yapılır.	MSÜ Personeli ve Klinik Hemşiresi	
Malzemenin dekontaminasyonu ve dezenfeksiyonu yapılır.	MSÜ Personeli	
Malzemelerin temiz alana sevki yapılır. Temiz alanda malzemelerin bakımı ve paketleme işlemi yapılır.	MSÜ Personeli	
Paketlenen malzemelerin sayıları otomasyon sistemine kaydedilir.	MSÜ Personeli	
Otoklav yükleme, uygun program seçimi ve çalıştırma işlemi yapılır.	MSÜ sorumlusu ve MSÜ Personeli	Otomasyon sistemine kaydedilen malzeme listeleri
İndikatör kontrolü yapılır.	MSÜ Personeli	
Sterilizasyon kontrollerinden sonar, temiz alanda depolama işlemi yapılır.	MSÜ sorumlusu ve MSÜ Personeli	Otoklav döngü kayıtları ve kimyasal indikatör test sonuçları
Malzemelerin ilgili birimlere transferi yapılır.	MSÜ Personeli	