



**Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü  
Kardiyoloji Cihazı Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	MÜH.TL.0116
<b>Yayın Tarihi:</b>	20.07.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

Bu cihaz EKG sinyalleri ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla kullanılmaktadır. Kardiyoloji Cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Güç tuşuna basılıp cihaz açılır.
2. Elektrot kablosu cihazın ilgili kısmına bağlanır.
3. Elektrot kablosu rengine göre kısaç elektrotlara bağlanır.
4. Sırasıyla siyah elektrot sol bileğe, sarı elektrot sağ bileğe, kırmızı elektrot sol ayak bileğine ve yeşil elektrot ise sağ ayak bileğine bağlanır.
5. Elektrot bağlantıları yapılırken metal yüzeyin cilde temas ettiğinden emin olunur.
6. Cihaz arayüzündeki fonksiyonlar kullanılarak ölçümler alınır.
7. Yazıcı aracılığıyla ölçümlerin çıktısı alınabilir.
8. Ölçümler alındıktan sonra güç tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA